



SKÓRA



RANY



Askina® Barrier Film

POLIMEROWA BARIERA OCHRONNA SKÓRY

Askina® Barrier Film

POLIMEROWA, PIELĘGNUJĄCA I OCHRONNA BARIERA SKÓRY.
SZYBKO SCHNĄCA, PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE.

WSKAZANIA

- Produkt jest przeznaczony, jako bariera ochronna do użycia na zdrową lub uszkodzoną skórę (możliwość stosowania również do skóry delikatnej i wrażliwej)
- Chroni przed drażniącym działaniem wydaliny i wydzieliny pacjenta (ochrona skóry pacjenta z inkontynencją)
- Zabezpiecza skórę wokół ran i stomii
- Pod opatrunki, w celu zabezpieczenia skóry przed uszkodzeniami przy zdejmowaniu opatrunku
- Do miejsc zamocowania drenów i cewników
- Ochrona miejsc wrażliwych, takich jak: pięty, łokcie, palce stóp, biodra – przed otarciem
- Na małe rany i otarcia skóry

WŁAŚCIWOŚCI

- Nie powoduje podrażnień, możliwość stosowania na uszkodzoną skórę
- Szybko wysycha – poniżej 30 sek.
- Nie wysusza, umożliwia oddychanie skóry
- Przezroczysty, umożliwia kontrolę wizualną skóry
- Łatwy do usunięcia
- Poprawia przyleganie opatrunków i plastrów mocujących
- Nie ogranicza skuteczności / wchłaniałości stosowanych wkładek higienicznych / pielucho-majtek
- Bezproblemowe użycie (nie utrudnia przyklejania) sprzętu stomijnego
- Możliwość stosowania u niemowląt pow. 3 miesiąca życia
- Wysoce wydajny – do 140 aplikacji z jednego opakowania
- Bariera ochronna utrzymuje się przez 48-72 h

SPOSÓB UŻYCIA

Umyć skórę z użyciem odpowiedniego mydła (np. Softaskin) a następnie delikatnie osuszyć. Spryskać skórę z odległości 10 – 15 cm nakładając polimerową warstwę ochronną.

Przed nałożeniem sprzętu stomijnego / opatrunku odczekać ok. 30 sekund do wyschnięcia.

W razie konieczności produkt można usunąć za pomocą medycznych zmywaczy do skóry (np. Adhesive Remover Spray) lub delikatnej emulsji myjącej.



Przykład użycia Askina Barrier Film do pielęgnacji skóry wokół stomii.

Dostępne opakowania	Numer katalogowy
Askina Barrier Film	5036

Skład: Disiloksan, kopolimer akrylowy

Wyrób medyczny klasa I

CE 0050



AESULAP CHIFA sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.bbraun.pl

AESULAP CHIFA – firma grupy B. Braun