



Askina® Calgitrol® Ag+

Innowacyjny opatrunek specjalistyczny
na bazie alginianu srebra

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Askina® Calgitrol® Ag+

INFORMACJA OGÓLNA

Askina® Calgitrol® Ag+ to opatrunek na rany, który łączy w sobie przeciwdrobnoustrojowe srebro ze wzmacniającym włóknem celulozowym, aby poradzić sobie z infekcją rany i wysokim wysiękiem. Opatrunek wspomaga gojenie w wilgotnym środowisku. Po nałożeniu Askina® Calgitrol® Ag+ reaguje, tworząc żel w kontakcie z wysiękiem z rany. Tworzący się żel zatrzymuje, blokuje i zabija bakterie z dala odłożyska rany. Zawiera kapsułkowane nanocząsteczki srebra jonowego osadzone we wzmacniającym włóknie celulozowym. Nanocząsteczki działają jak rezerwuuar srebra jonowego i są stopniowo uwalniane w kontakcie z płynem z rany w celu zabicia bakterii i mikroorganizmów wewnątrz opatrunku.

Antybakteryjne opatrunki na rany Askina® Calgitrol® Ag+ mogą być stosowane pod nadzorem pracownika służby zdrowia:

- Wszystkie grupy wiekowe
- Ran o umiarkowanym lub silnym wysięku ran przewlekłych, np. owrzodzeń podudzi, odleżyn i owrzodzeń cukrzycowych.
- Rany chirurgiczne, np. rany pooperacyjne, rany pozostawione do zagojenia w wyniku wtórnego zamiaru i miejsca dawcze
- Rany urazowe, np. otarcia i skaleczenia

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka absorpcja
- Nie przylega do rany
- Szerokie spektrum przeciwdrobnoustrojowe
- Długotrwałe uwalnianie srebra jonowego wewnątrz opatrunku
- Niska cytotoksyczność
- Rozbija i niszczy biofilm

SKŁAD:

- Włókno żelujące z karboksymetylocelulozy (CMC)
- Wzmacniające włókno celulozowe
- Włókno celulozowe zawierające nanocząsteczki srebra

WSKAZANIA

Opatrunek Askina® Calgitrol® Ag+ stosowany do leczenia ran odleżynowych I – IV stopnia, owrzodzeń żylnych, oparzeń II stopnia oraz miejsc pobierania przeszczepów.

PRZECIWWSKAZANIA

Opatrunek Askina® Calgitrol® nie powinno się stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na alginiany lub srebro. Opatrunek Askina® Calgitrol® nie należy stosować w przypadkach, gdzie przeciwwskazaniem jest obecność metali. Stosowanie ich jest przeciwwskazane w przypadku owrzodzeń wywołanych gruźlicą, kiłą, czy silnym zakażeniem grzybiczym, a także w przypadku oparzeń III stopnia.

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.

DOSTĘPNE ROZMIARY

ASKINA® CALGITROL® AG+:	10x10	SFM6211010
	15x15	SFM6211510

UWAGA

Ponowne użycie produktów jednorazowych stwarza potencjalne ryzyko dla pacjenta i użytkownika. Może to doprowadzić do zakażenia i/lub osłabienia prawidłowego funkcjonowania produktu. Zakażenie i/lub ograniczenie funkcjonalności produktu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, choroby bądź śmierci pacjenta. Produkt sterylny do momentu otwarcia lub uszkodzenia.

Opatrunki możemy zostawić w ranie do siedmiu dni lub do momentu, w którym wymiana opatrunku jest konieczna.