



RANY



ASKINA[®] CALGITROL[®] PASTE

OPATRUNEK PIERWOTNY W POSTACI PASTY Z ALGINIANEM SREBRA

ASKINA® CALGITROL® PASTE

OPATRUNEK PIERWOTNY W POSTACI PASTY Z ALGINIANEM SREBRA

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Askina Calgitrol Paste jest sterylnym opatrunkiem pierwotnym w postaci półpłynnej pasty, składającym się z polisacharydowej struktury alginianu połączonych z jonami srebra. Możliwość szczelnego dopasowania się pasty do kształtu rany i bezpośredni kontakt jonów srebra z jej łóżyskiem powoduje wysoką skuteczność leczenia pacjentów z ranami takimi jak stopa cukrzycowa, odleżyny lub oparzenia II stopnia. Preparat przeznaczony jest do leczenia zakażonych ran w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i domowych.

PRZEZNACZENIE

Askina Calgitrol Paste jest przeznaczona do wypełniania głębokich ran, w szczególności w zakażonym zespole stopy cukrzycowej, leczenia odleżyn I-IV stopnia, owrzodzeń powstałych w wyniku niedokrwienia, oparzeń II stopnia oraz miejsc pobrania przeszczepu. Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego i może być stosowany do leczenia zainfekowanych ran. W przypadku zakażenia szpitalnego, miejscowa terapia jonami srebra nie może zastąpić ogólnoustrojowego leczenia. Askina Calgitrol Paste nie powinna być stosowana u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na alginiany i srebro.

WŁAŚCIWOŚCI


- Produkt dostosowany do bezpośredniego kontaktu z łóżyskiem rany
- Tubka 15 g zawiera 180 mg srebra jonowego, uwalnianego do rany w sposób utrzymujący stężenie 60 ppm w łóżysku rany w czasie do 7 dni. Zapewnia to stabilną aktywność terapeutyczną w środowisku rany skontaminowanej, pokrytej biofilmem oraz zakażonej
- Stężenie srebra utrzymuje się na poziomie terapeutycznym, nie przekraczając poziomu toksycznego
- Nie wymaga aktywacji – absorpcja wysięku przez strukturę alginianu prowadzi do jej uplastycznienia
- Utrzymuje wilgotne środowisko rany
- Dołączona kaniula umożliwia łatwą aplikację do ran tunelowych i małych przetok
- Łatwe i bezbolesne usuwanie z rany przez irygację
- Nie powoduje przebarwień
- Produkt sterylny (zgodnie z normą ISO 15223-1)

SPOSÓB UŻYCIA

Przemyj ranę odpowiednim roztworem oczyszczającym – np. Prontosan, po czym osusz skórę wokół rany sterylnym gazikiem. Wstrząśnij tubką przed użyciem, usuń zewnętrzną folię zabezpieczającą i zdejmij nakrętkę. Nanieś warstwę pasty na całą powierzchnię rany, następnie załóż opatrunek zewnętrzny, odpowiedni do ilości wysięku. Askina Calgitrol Paste powinna być wymieniana w ranie przy każdorazowej zmianie opatrunku (od 1-3 dni w zależności od stanu rany).

Askina Calgitrol Paste jest produktem łatwym w aplikacji i nie wymaga specjalnych umiejętności oraz sprzętu.

Zawartość tuby 15 g służy do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta. Pasta może być przechowywana i stosowana w ciągu 7 dni od otwarcia.

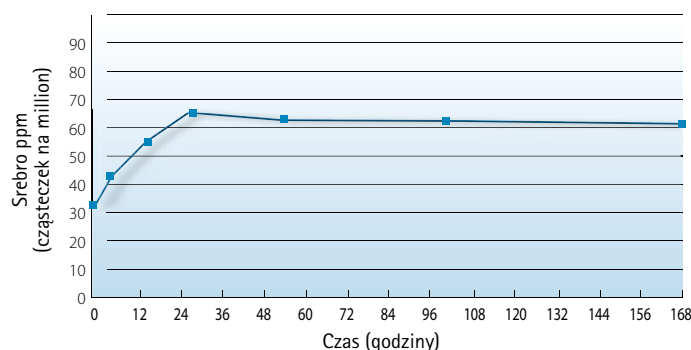

Rys. Uwalnianie jonów srebra in vitro z opatrunków Calgitrol Ag

Dostępne opakowania

Numer katalogowy

Askina Calgitrol Paste - 10 tub o poj. 15 g

7211599

Askina Calgitrol Paste - 5 tub o poj. 15 g

7211598

Wyrób medyczny kl. III

