



Askina® Derm Lite

Opatrunek z folii poliuretanowej

- Przezroczysty
- Półprzepuszczalna folia poliuretanowa
- Hipoalergiczny klej akrylowy
- Mocowanie opatrunku na ranie
- Mocowanie cewnika
- Umożliwia wizualną kontrolę rany
- Nieprzepuszczalny dla mikroorganizmów

Askina® Derm Lite

Opatrunek z folii poliuretanowej

Askina® Derm Lite – to sterylny, przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej. Jest półprzepuszczalny i odpowiedni do ochrony nowo powstałej skóry. Tworzy wilgotne środowisko gojenia rany.

Wskazania:

- miejsca wkląć dożylnych i cewników
- do mocowania rurek drenażowych
- do mocowania innych opatrunków takich jak opatrunek alginianowy, opatrunek piankowy
- jako opatrunek wtórny dla hydrożeli (Prontosan Żel/ Żel X), Askina Calgitrol Pasty i Braunovidon (rany niskosącące).

Ochrona ran niewysięgowych takich jak:

- odleżyny I stopnia
- drobne otarcia
- oparzenia I stopnia
- rany chirurgiczne
- rany szarpane

Wskazówki

Askina® Derm Lite to przezroczysta, półprzepuszczalna folia poliuretanowa z hipoalergicznym klejem akrylowym. Folia poliuretanowa pokryta klejem akrylowym o niskiej wrażliwości na nacisk może skutecznie przymocować opatrunek do rany lub przymocować cewnik do określonej części.

Innowacyjny system aplikacji



Usuń zadrukowany papier antyadhezyjny z samoprzylepnej strony opatrunku.



Oczyść ranę roztworem Prontosan płyn, nałóż w zależności od wskazań: Prontosan Żel/ Żel X, Askina Calgitrol Pasta lub Braunovidon maść. Osusz miejsce otaczające skórę. Umieść opatrunek na miejscu rany tak, aby wypustki po stronie przylepnej były skierowane w stronę rany. Delikatnie dociśnij opatrunek, aby przylegał do rany.



Zdejmij plastikowy uchwyt, odrywając wypustki w kierunku wskazanym strzałkami.



Zdejmij plastikowy uchwyt, odrywając wypustki w kierunku wskazanym strzałkami.

Uwaga!

Nie stosować na rany głębokie i oparzenia.



Rozmiar	Askina® Derm Lite	Ilość w pudełku
6 x 7 cm	WINF72032	10
10 x 12 cm	WINF72034	5
	WINF72036	50