



Askina® Foam

- Wysoka zdolność absorpcji płynów
- Nieprzepuszczalna dla wody i odporna na bakterie powłoka
- Zmniejsza ryzyko maceracji
- Poprawia wilgotne środowisko rany
- Wizualna kontrola wchłaniania wysięku
- Delikatny dla skóry - atraumatyczna zmiana opatrunku

Askina® Foam

Askina® Foam - Chłonny opatrunek

- minimalizuje ból
- nie uszkadza tworzącej się ziarniny podczas zmiany
- wchłania wysięk
- tworzy wilgotne środowisko
- zapewnia wodoodporną, nieprzenikliwą dla bakterii barierę

Wskazania:

Askina® Foam jest przeznaczony do szerokiej gamy ran o umiarkowanym i silnym wysięku, takich jak:

- odleżyny
- owrzodzenia
- rany urazowe (w tym skaleczenia, otarcia, rany szarpane)
- oparzenia I i II stopnia

- rany chirurgiczne, rany po zabiegach operacyjnych
- do profesjonalnego zaopatrywania ran w podologii

Cechy:

- wodoodporność
- przepuszczalność pary wodnej
- odporność na bakterie
- nie zawiera lateksu



Sposób użycia:

Ranę oczyścić przy użyciu Prontosan płyn, osuszyć. Dobrać rozmiar opatrunku tak, aby zachodził na brzegi rany 2-3 cm.



Nałożyć na powierzchnię rany opatrunek białą, piankową stronę. Ustabilizować przy użyciu Askina Derm Lite, plastra lub bandażu.



Wymiana opatrunku do 7 dni, używać nie dłużej niż 30 dni

Uwaga!

- Można łączyć z: Prontosan Żel/ Żel X, Askina Calgitrol Pasta
- Nie można stosować razem z utleniaczami takimi jak: podchloryny i nadtlenek wodoru.



Rozmiar	Askina® Foam	Ilość w pudełku
10 x 10 cm	WIN7241010	10
15 x 15 cm	WIN7241510	10