



LECZENIE
RAN



Prontosan Spray

Skuteczny produkt - Na każdym etapie leczenia ran

Prontosan Spray

Skuteczny produkt – Na każdym etapie leczenia ran

WŁAŚCIWOŚCI

- Idealny na skaleczenia, zadrapania, otarcia
- Rekomendowany na każdym etapie leczenia większości ran według schematu TIME
- Wyrób medyczny klasy III
- Zawiera dwa unikalne składniki: poliheksanidynę i betainę
- Przyspiesza gojenie się ran, zmniejsza ból
- Redukuje powstawanie blizn, zapobiega zakażeniom rany
- Leczy rany oparzeniowe

PRODUKTY ZAWIERAJĄCE POLIHEKSANIDYNĘ Z BETAINĄ:

- są najlepiej tolerowane przez dzielące się komórki występujące w ranach –keratynocyty
- nie są toksyczne i stwarzają właściwe środowisko dla gojącej się rany
- mogą być dłużej używane niż antyseptyki, które są toksyczne dla keratynocytów

3 proste kroki: Prontosan Spray – Zastosowanie



1. Jeśli masz zaschnięty plaster lub strup na ranie, obficie spryskaj przyschnięty opatrunek preparatem Prontosan, odczekaj ok. 7–10 min. i odklej bezboleśnie nasączony plaster.



2. Następnie użyj ponownie preparat Prontosan, pryskając bezpośrednio na ranę, w taki sposób aby cała jej powierzchnia i otoczenie była wilgotna.

3. Na tak przygotowaną ranę przyklej plaster, aby preparat Prontosan mógł dłużej działać i zabezpieczyć ranę.

Czynności powtarzaj kilka razy w ciągu dnia.

PRZEZNACZENIE I CECHY PRODUKTU PRONTOSAN SPRAY:

- czyszczenie, nawilżanie ran i oparzeń powierzchniowych
- zapobieganie zakażeniom ran i ochrona przed bakteriami opornymi na antybiotyki (MRSA, VRE, ESBL)
- zmniejsza ból, nie wywołuje bólu podczas stosowania
- stwarza optymalne warunki do gojenia się ran
- nie hamuje ziarninowania i naskórkowania
- umożliwia bezbolesne usuwanie zaschniętych opatrunków
- dermatologicznie przebadany

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- tylko do stosowania zewnętrznego na rany; nie przyjmować doustnie, nie stosować do infuzji.
- nie stosować w przypadku alergii lub podejrzenia alergii na którykolwiek ze składników produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania produktu i środków ostrożności są zawarte w Informacji dla Użytkownika.

Skład; betaina- substancja powierzchniowo czynna, 0.1% poliheksanidyna, woda oczyszczona.

Z TYCH POWODÓW SPRAY NA RANY PRONTOSAN®
JEST JEDNYM Z NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW DO LECZENIA
RAN OSTRYCH I RAN PRZEWLEKŁYCH,
RAN INCYDENTALNYCH ORAZ DŁUGOTRWAŁEGO
STOSOWANIA PRODUKTU.

Dostępne opakowania	Numer katalogowy
Prontosan spray - but.75 ml	400568
Prontosan spray - but.75 ml (20 szt.)	400567