

Softa® Cloth CHX 2 %

Zapobieganie ryzyku podczas terapii
infuzyjnej



Softa® Cloth CHX 2 %

Chusteczka do dezynfekcji połączeń infuzyjnych


Czy wiesz?

Zakażenie krwiobiegu związane z cewnikiem dożylnym (CRBSI) jest jedną z sześciu najważniejszych przyczyn zakażeń szpitalnych (HAI)¹. CRBSI definiuje się jako obecność bakterii pochodzącej z cewnika dożylnego. Jest to jedno z najczęstszych, śmiertelnych i kosztownych powikłań cewnikowania żyły centralnej, a także najczęstsza przyczyna zakażeń szpitalnych.


Jedna trzecia CRBSI będzie wymagać leczenia w szpitalu ze znacznym obciążeniem finansowym². Średni koszt każdej hospitalizacji szacuje się na 22 000 USD za epizod bakteriemii.

Instrukcja aplikacji


Softa® Cloth CHX 2% to jednorazowe chusteczki nasączone alkoholem z 2% CHX do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń medycznych, a w szczególności do połączeń infuzyjnych. Chusteczka jest kompatybilna z Discofix® C, Caresite® i Safeflow, zapewniając bezpieczny i wygodny dostęp do infuzji.

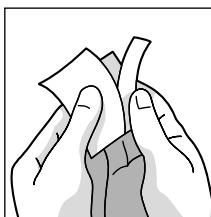


Założ rękawiczki i wyjmij chusteczkę z opakowania.

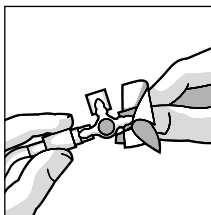

Wyczyść wizualnie czyste miejsce dostępu przez co najmniej 5 sekund skracając chusteczkę (zanieczyszczenia należy usuwać wcześniej, używając do tego celu oddzielnej chusteczki).

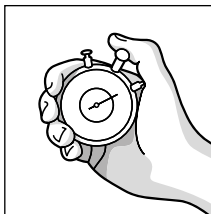

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia. Nie wycieraj do sucha.

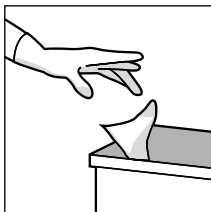

Po użyciu wyrzucić chusteczkę.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Mikroorganizm	Normy testowe	Czas działania
Bakterie	EN 13727	15 sek.
	EN 16615*	1 min.
Grzyby (C.albicans)	EN 13624	15 sek.
	EN 16615*	1 min.
Wirusy otłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV)	DVV/RKI	15 sek.
	EN 14476	30 sek.

* Badanie z krótszym czasem ekspozycji jest technicznie niemożliwe.

Softa Cloth CHX 2% zawiera:

70% obj. alkoholu izopropylowego, 2% w/v glukonianu chlorheksydyny.

Dane fizyko-chemiczne

Materiał tkaniny	25 g / m ² 100% PP (wykończenie hydrofilowe niejonowe)
Rozmiar tkaniny	Rozłożona tkanina: 162 mm × 150 mm Złożona tkanina: 42 mm × 32 mm
Wygląd	Czysta, biała, jednolita chusteczka zwilżona płynem, wolna od ciał obcych

Oznakowanie towarów niebezpiecznych

Sprawdź kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
Używaj środków dezynfekujących bezpiecznie. Przed użyciem zapoznaj się z tekstem etykiety produktu. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności. Tylko do użytku profesjonalnego. Trzymać z dala od dzieci.

Rejestracja


Softa® Cloth CHX 2% jest zarejestrowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 i posiada znak CE.

1 Catheter-related bloodstream infections – Published 4. April 2014 – <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093967>

2 Prevention of catheter-related bloodstream infections in patients on hemodialysis: challenges and management strategies – Published 18. April 2016 – <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4846073>

Pięć źródeł CRBSI w terapii infuzyjnej¹

Softa® Cloth CHX 2% pomaga zredukować ryzyko infekcji w każdym z pięciu przedstawionych źródeł zakażenia związanego z cewnikiem (CRBSI). Przed i po każdej manipulacji dostęp naczyniowy musi zostać wyczyszczony i zdezynfekowany. Tylko czysty i zdezynfekowany dostęp naczyniowy jest bezpieczny i zapobiega zakażeniom szpitalnym.

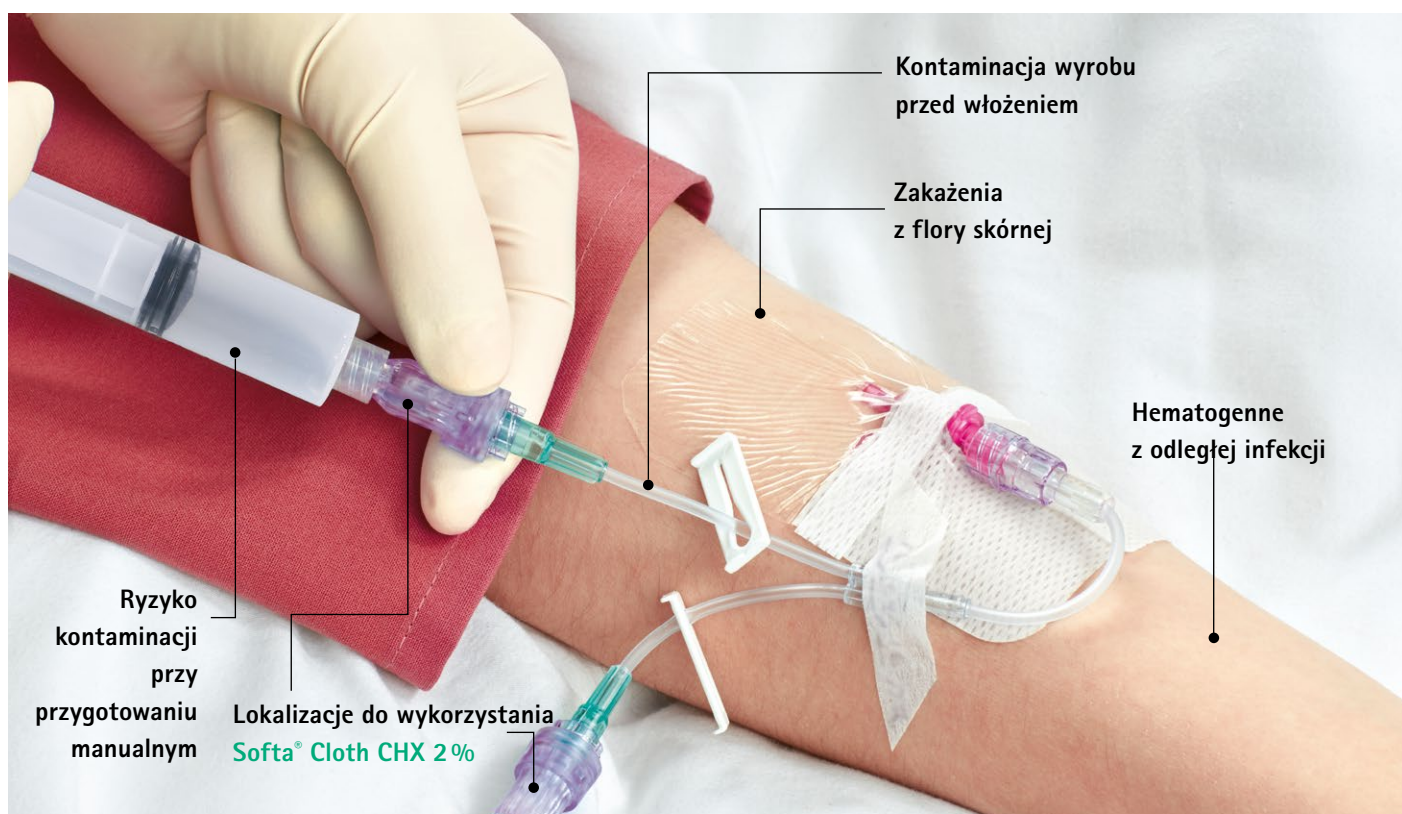

Dostępne opakowania

Nazwa produktu	Okres przydatności do spożycia	Rozmiar opakowania	Nr kat.
Softa® Cloth CHX 2%	24 miesiące	100 szt.	19581

